

Link do produktu: <https://eros.abrakadabra.shop.pl/kubeczki-menstruacyjne-satisfyer-silikonowe-2szt-p-40959.html>



## Kubeczki menstruacyjne satisfyer silikonowe 2szt

Cena	<b>33,30 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>ERO-73-4002019</b>
Kod producenta	<b>73-4002019</b>
Kod EAN	<b>4061504002019</b>

### Opis produktu

SILIKONOWE KUBECZKI MENSTRUACYJNE SATISFYER ZESTAW

**Zestaw kubeczków menstruacyjnych Feel Confident** marki **Satisfyer** dla kobiet, do używania podczas menstruacji.

Są to **kubeczki wielokrotnego użytku**. Nowocześnie zaprojektowane, by cieszyć kobiece oko, ale przede wszystkim by zapewnić kobietom maksymalny komfort podczas "trudnych dni". Dzięki wysokiej jakości silikonowi medycznemu, z którego zostały wykonane łatwo się je wkłada oraz wyjmuje. Dodatkowo posiadają wygodny uchwyt, dzięki któremu z łatwością wyjmiesz kubeczek z pochwy.

Kubeczek menstruacyjny to komfortowy środek higieniczny dla kobiet oraz genialna **alternatywa dla tamponów oraz podpasek**. Ich działanie polega na tym, że krew menstruacyjna jest zbierana w zbiorniczku kubeczka. Po napełnieniu lub po kilku godzinach użytkowania należy go opróżnić, umyć i ponownie założyć. Kubeczki nie pochłaniają cieczy oraz zapachów. Można je nosić aż do 12 godzin!

#### Zalety kubeczków menstruacyjnych Feel Confident:

- kubeczek **wielokrotnego użytku**
- **można używać podczas uprawiania sportu** (także na pływalni)
- ogromna **swoboda oraz komfort** dla kobiety podczas miesiączki
- elastyczne i miękkie, dzięki czemu są bardzo łatwe w zakładaniu i wyjmowaniu
- wygodny uchwyt do wyjmowania (dodatkowo spełnia funkcję bezpieczeństwa - pozwala łatwo namierzyć kubeczek w pochwie)
- można je nosić do 12 godzin
- **duża oszczędność** dla Twojego portfela
- wysoka jakość wykonania
- **łatwe do utrzymania w czystości**
- nowoczesny design, który wyróżnia je na tle konkurencji
- bezpieczny dla ciała (wolny od ftalanów)
- nie powoduje podrażnień oraz otarć
- hipoalergiczny
  - dokładnie umyj ręce, a następnie umyj kubeczek
  - zmniejsz średnicę kubeczka poprzez ściśnięcie kciukiem jego przedniej ścianki
  - zwinięty w literę C kubeczek łatwo wsunie się do pochwy
  - po włożeniu kubeczka do pochwy delikatnie go obróć (dzięki temu kubeczek odpowiednio się rozłoży oraz będzie przylegał do ścianek pochwy)
  - skieruj dwa palce do środka pochwy (kciuk oraz palec wskazujący) wzdłuż ogonka oraz brzegów kubeczka
  - delikatnie ściśnij dolną ściankę kubeczka, aby kubeczek się odessał
  - delikatnie kołyszając kubeczkiem na boki wyjmij go ostrożnie
  - umyj kubeczek
  - załóż ponownie
  - po menstruacji kubeczki należy wygotować (zanurzyć we wrzącej wodzie przez kilka minut)

#### Dodatkowe cechy kubeczka menstruacyjnego:

- 
- Feel Confident - krótki uchwyt. Idealne na pływalnię, saunę lub uprawiania sportu.
  - Zestaw: 2 kubeczki + woreczek do ich przechowywania
  - Pojemność kubeczków: 15 ml oraz 20 ml
  - Kolor: przezroczyste