

Link do produktu: <https://eros.abrakadabra.shop.pl/silikonowy-kubek-menstruacyjny-zamiast-tamponow-l-p-28446.html>



Silikonowy kubek menstruacyjny zamiast tamponów I

Cena	31,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ERO-4-30541
Kod producenta	4-30541
Kod EAN	8433345305417

Opis produktu

SILIKONOWY KUBECZEK MENSTRUACYJNY ZAMIAST TAMPONÓW W ROZMIARZE L

Kubeczek menstruacyjny, rozmiar L - przeznaczony dla kobiet, **do użytkowania podczas menstruacji**. Został zaprojektowany w taki sposób, żeby jego włożenie nie sprawiało żadnego problemu.

Łatwo wsuwa się do pochwy, a dzięki dość długiej, wygodnej końcówce w prosty sposób można go wyjąć. Końcówkę można przyciąć nożyczkami i dzięki temu dopasować ją do własnych potrzeb.

Jest to **komfortowy środek higieniczny**, który zapewni ogromną swobodę każdej kobiecie.

Kubeczki menstruacyjne są świetną alternatywą dla podpasek oraz tamponów. Krew menstruacyjna jest zbierana w zbiorniczku kubeczka. Po napełnieniu lub po kilku godzinach użytkowania należy go opróżnić, umyć i ponownie założyć.

Zalety kubeczka menstruacyjnego:

- można używać podczas uprawiania sportu (także na pływalni)
- ogromna swoboda oraz komfort dla kobiety podczas miesiączki
- bezpieczny dla ciała (wolny od ftalanów) - 100% silikon medyczny
- hipoalergiczny
- wysoka jakość
- nie powoduje otarć, ani podrażnień

Instrukcja wkładania kubeczka menstruacyjnego:

- umyj dokładnie ręce
- umyj kubeczek
- zmniejsz średnicę kubeczka poprzez ściśnięcie kciukiem jego przedniej ścianki
- zwinięty kubeczek w literę C łatwo wsunie się do pochwy
- po włożeniu kubeczka do pochwy delikatnie go obróć (kubeczek odpowiednio się rozłoży oraz będzie ściśle przylegał do ścianek pochwy)

Instrukcja wyjmowania kubeczka menstruacyjnego:

- skieruj dwa palce do środka pochwy (kciuk i palec wskazujący) wzdłuż brzegów kubeczka
- ściśnij delikatnie dolną ściankę kubeczka, żeby kubeczek się odessał
- kołysząc kubeczkiem na boki ostrożnie go wyjmij
- umyj kubeczek
- załóż ponownie

Rozmiary kubeczka menstruacyjnego:

Kubeczki menstruacyjne dostępne są w dwóch rozmiarach: S, L.

- Rozmiar S - dla kobiet, które jeszcze nie rodziły oraz poniżej 25 roku życia. Mogą ich także używać nastolatki.
- Rozmiar L - dla pań, które już rodziły naturalnie lub/oraz dla kobiet po 25 roku życia.

Wymiary kubeczka menstruacyjnego:

- Całkowita długość: 7,5 cm
- Rozmiar: L - dla pań, które już rodziły naturalnie lub/oraz dla kobiet po 25 roku życia.
- Model: Sensitive L