

Link do produktu: <https://eros.abrakadabra.shop.pl/silikonowy-kubek-menstruacyjny-zamiast-tamponow-s-p-28445.html>



## Silikonowy kubek menstruacyjny zamiast tamponów s

Cena	<b>30,30 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>ERO-4-30531</b>
Kod producenta	<b>4-30531</b>
Kod EAN	<b>8433345305318</b>

### Opis produktu

#### **SILIKONOWY KUBECZEK MENSTRUACYJNY ZAMIAST TAMPONÓW W ROZMIARZE S**

Kubeczek menstruacyjny, rozmiar S - przeznaczony dla kobiet, **do użytkowania podczas menstruacji**. Został zaprojektowany w taki sposób, żeby jego włożenie nie sprawiało żadnego problemu.

Łatwo wsuwa się do pochwy, a dzięki dość długiej, wygodnej końcówce w prosty sposób można go wyjąć. Końcówkę można przyciąć nożyczkami i dzięki temu dopasować ją do własnych potrzeb.

Jest to **komfortowy środek higieniczny**, który zapewni ogromną swobodę każdej kobiecie.

**Kubeczki menstruacyjne są świetną alternatywą dla podasek oraz tamponów**. Krew menstruacyjna jest zbierana w zbiorniczku kubeczka. Po napełnieniu lub po kilku godzinach użytkowania należy go opróżnić, umyć i ponownie założyć.

Zalety kubeczka menstruacyjnego:

- można używać podczas uprawiania sportu (także na pływalni)
- ogromna swoboda oraz komfort dla kobiety podczas miesiączki
- bezpieczny dla ciała (wolny od ftalanów) - 100% silikon medyczny
- hipoalergiczny
- wysoka jakość
- nie powoduje otarć, ani podrażnień

Instrukcja wkładania kubeczka menstruacyjnego:

- umyj dokładnie ręce
- umyj kubeczek

- 
- zmniejsz średnicę kubeczka poprzez ściśnięcie kciukiem jego przedniej ścianki
  - zwinięty kubeczek w literę C łatwo wsunie się do pochwy
  - po włożeniu kubeczka do pochwy delikatnie go obróć (kubeczek odpowiednio się rozłoży oraz będzie ściśle przylegał do ścianek pochwy)

Instrukcja wyjmowania kubeczka menstruacyjnego:

- skieruj dwa palce do środka pochwy (kciuk i palec wskazujący) wzdłuż brzegów kubeczka
- ściśnij delikatnie dolną ściankę kubeczka, żeby kubeczek się odessał
- kołysząc kubeczkiem na boki ostrożnie go wyjmij
- umyj kubeczek
- załóż ponownie

Rozmiary kubeczka menstruacyjnego:

Kubeczki menstruacyjne dostępne są w dwóch rozmiarach: S, L.

- Rozmiar S - dla kobiet, które jeszcze nie rodziły oraz poniżej 25 roku życia. Mogą ich także używać nastolatki.
- Rozmiar L - dla pań, które już rodziły naturalnie lub/oraz dla kobiet po 25 roku życia.

**Wymiary kubeczka menstruacyjnego:**

- Całkowita długość: 7,5 cm
- Rozmiar: S - dla kobiet poniżej 25 roku życia oraz tych, które jeszcze nie rodziły
- Model: Sensitive S